

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.  
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	신장자 손잡이
제품번호	RSP500, RSP501, RSP510, RSP520, RSP540 RSP550, RSP551

## 시공 완성도

**다용도용 손잡이(L형)**  
RSP501은 RSP500과 굽힌 방향만 반대임.

품 번	L1	L	비 고
RSP500/RSP501	700	900	

**소변기용 손잡이**

품 번
RSP540

**다용도용 손잡이(I형)**

품 번
RSP510

**세면기용 손잡이**

품 번
RSP550

**대변기용 손잡이(신장자도기용)**

품 번
RSP520

**세면기용 손잡이**

품 번
RSP551

## 시공 전 주의 사항

■ 본제품은 노인분 또는 신체장애로 거동이 불편하거나, 거동이 어려운 분들이 본 손잡이에 의지하는 기구이므로 고정방법은 대단히 중요합니다.


※ 다음 사항에 대하여 주의하여 주십시오.

- 설치하고자하는 벽면은 반드시 붉은 벽들이나 콘크리트벽면이 되도록 하십시오. 시멘트벽돌과 같이 벽면이 약할 경우에는 고정이 약하게되므로 절대 설치하지 마십시오.
- 제품에 따라 시공치수의 차이가 있을 수 있으므로 시공시 제품의 실제 치수를 확인 후 시공하여 주십시오.
- 외관이 흰색 PVC코팅 제품이므로 시공시 흙이 나지 않도록 주의하여 시공 하십시오.


## 시공 방법

### 1. B부 연결방법

- (1) 취부스크류에 와셔를 끼워 그림과 같이 연결부가 흔들리지 않도록 완전히 체결해 주십시오.

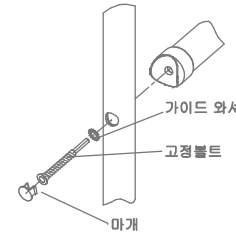

- (2) 스크류 구멍을 막기위해 마개를 그림과 같이 한쪽 방향씩 밀어서 끼워줍니다.

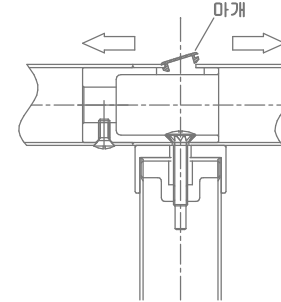


### 2. 나일론 앵커작업

- (1) 시공완성도를 참조하여 실제제품을 설치하고자 하는 위치에 놓고 미리 돌을 구멍부위를 표시하여 주십시오.

- (2) 표시한 구멍위치를  $\phi 10.5$  드릴로 깊이가 약60mm로 돌려 주십시오.

※ 주의 : 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으므로 주의하여 주십시오.

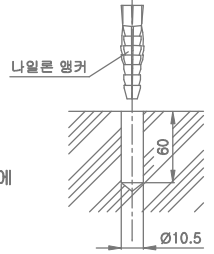


- (3) 그림과 같이 풀어놓은 구멍에 나일론 앵커를 끼워 넣어 주십시오.

### 3. 손잡이 설치

- (1) 설치하고자 하는 제품의 고정후렌지 구멍과 벽면 또는 바닥면에 삽입한 나일론 앵커 구멍을 일치시켜 고정볼트를 완전히 고정시킨 다음 후렌지커버를 씌워 주십시오.



## 청 소 방 법

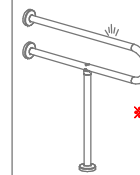

외관청소시에는 중성세제를 이용하여 부드러운 천으로 청소하여 주십시오.

※ 표면이 거친 수세미 또는 알콜, 락스, 신나를 이용하여 청소하게 되면 코팅면이 손상될 수 있으므로 주의하여 주십시오.